


Tecnologia que simplifica e protege

Reduza riscos de exposição accidental com sistema de retração por mola. Simples, seguro e em conformidade com a NR 32.

Estéril, de uso único, com bisel trifacetado; confeccionada em polímero plástico rígido, translúcido, **compatível com seringas de conexões Luer Slip e Luer Lock, bem como seringas pré-preenchidas,** garantindo um perfeito encaixe e vedação, proporcionando **maior segurança e minimizando riscos de vazamentos.**

Vantagens

- **Para pacientes:** maior redução do risco de contaminação cruzada e transmissão de doenças;
- **Para instituição médico-hospitalar:** diminuição de custos com tratamento de acidentes de trabalho, afastamentos e possíveis processos judiciais;
- **O acionamento da mola bloqueia a reutilização da agulha,** garantindo o cumprimento das exigências da NR 32;
- O acionamento da agulha resulta na **diminuição de seu volume inicial,** reduzindo o descarte e promovendo economia para a instituição;
- **Fácil de usar** e requer treinamento mínimo;

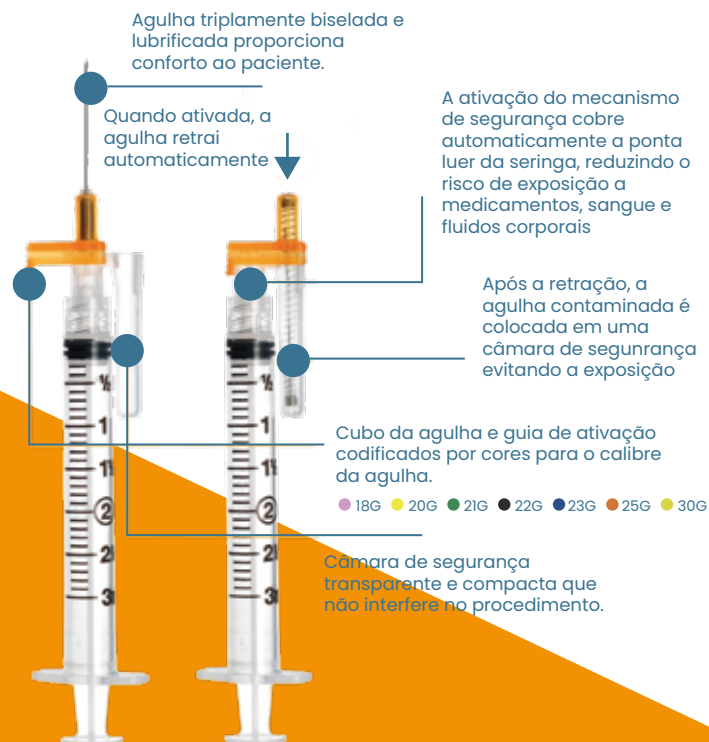

Tamanhos e Calibres

Para seringas de 1 e 3ml

8221I	30G x 1/2"	(13mm x 0,3mm)
8209I	25G x 5/8"	(16mm x 0,5mm)
8201I	25G x 1"	(25mm x 0,5mm)
8203I	23G x 1"	(25mm x 0,6mm)

Para seringas de 1, 3, 5 e 10ml

8524I	25G x 1/2"	(13mm x 0,45mm)
8529I	25G x 5/8"	(16mm x 0,5mm)
8521I	25G x 1"	(25mm x 0,5mm)
8523I	23G x 1"	(25mm x 0,6mm)
8502I	22G x 1"	(25mm x 0,7mm)
8504I	21G x 1"	(25mm x 0,8mm)
8506I	20G x 1"	(25mm x 0,9mm)
8508I	18G x 1"	(25mm x 1,2mm)
8509I	18G x 1 1/2"	(40mm x 1,2mm)
8511I	25G x 1 3/16"	(30mm x 0,5mm)
8513I	23G x 1 3/16"	(30mm x 0,6mm)
8512I	22G x 1 3/16"	(30mm x 0,7mm)
8514I	21G x 1 3/16"	(30mm x 0,8mm)
8516I	20G x 1 3/16"	(30mm x 0,9mm)
8518I	18G x 1 3/16"	(30mm x 1,2mm)



Acesse o QR Code e veja a EasyPoint[®] em ação



Fale conosco!

Entre em contato com o representante mais próximo da Biodina! Temos representantes em todo Brasil!

🌐 webmedsaude.com.br
✉ comercial@webmedsaude.com.br
☎ (32) 3241 5979

Descritivo Técnico

O **mecanismo de segurança integrado** proporciona visualização ideal da escala da seringa, facilitando o preparo da dose com máxima precisão.


As **seringas de insulina VanishPoint®** estão disponíveis com **graduações de 50 UI e 100UI**, garantindo a administração precisa de pequenas doses.

A **retração automática pré-remoção** reduz efetivamente o risco de acidentes com **perfurocortantes**, protegendo os profissionais de saúde durante todo o procedimento.

Para garantir a administração subcutânea adequada de insulina e maximizar o conforto do paciente, **as seringas VanishPoint®** estão disponíveis com **agulhas de diversos calibres**.

Vantagens

- **Administração de dose precisa** - graduações claras para máxima acurácia
- **Desenvolvida para o conforto do paciente** - opções de calibre de agulha adequadas a diferentes necessidades
- **Fácil utilização** - design intuitivo que simplifica o procedimento
- **Segurança garantida** - mecanismo de proteção eficaz e confiável
- **Redução do risco ocupacional** - minimiza lesões por acidentes com agulhas
- **Uso único garantido** - não reutilizável após ativação do mecanismo
- **Segurança até o descarte final** - proteção mantida durante todo o processo
- **Otimização do volume de descarte** - design compacto para gestão eficiente de resíduos

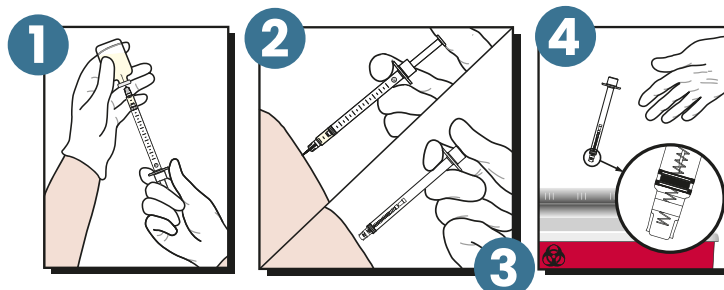

Informações de uso do produto

- 1 Prepare e administre a injeção utilizando técnica asséptica de acordo com o protocolo institucional.
- 2 Para injeção em pacientes, continue pressionando o êmbolo para ativar a retração automática da agulha enquanto a agulha ainda estiver no paciente. A dose completa é administrada somente quando a retração da agulha é ativada.
- 3 A agulha retrairá automaticamente para dentro da seringa, prevenindo a exposição à agulha contaminada e tornando a seringa não reutilizável.
- 4 Descarte a seringa VanishPoint® em recipiente apropriado para perfurocortantes conforme protocolo da instituição.

Tamanhos e Calibres

Caixa com 100 seringas (embaladas unitariamente)

Seringa Insulina Agulha Fixa	Insulina U-100	Agulhas - Especificações	Cod.
VanishPoint® II	100 unidades (1 mL)	29G x 1/2" (0.33 mm x 12.7 mm)	10211
VanishPoint® II	100 unidades (1 mL)	27G x 1/2" (0.40 mm x 12.7 mm)	10231
VanishPoint® II	100 unidades (1 mL)	30G x 3/8" (0.30 mm x 9.5 mm)	10251
VanishPoint® II	100 unidades (1 mL)	30G x 5/16" (0.30 mm x 8 mm)	10271
VanishPoint® II	100 unidades (1 mL)	30G x 3/16" (0.30 mm x 5 mm)	10291
VanishPoint® II	50 unidades (0,5 mL)	30G x 1/2" (0.30 mm x 12.7 mm)	15221
VanishPoint® II	50 unidades (0,5 mL)	30G x 5/16" (0.30 mm x 8 mm)	15271
VanishPoint® II	50 unidades (0,5 mL)	30G x 3/16" (0.30 mm x 5 mm)	15291

Fale conosco!

Entre em contato com o representante mais próximo da Biodina! Temos representantes em todo Brasil!

- Segura e eficaz em conformidade com a NR32
- Reduz significativamente o risco de lesões por agulha
- Proteção garantida ao profissional de saúde
- Registro ANVISA: 10301169008

