


Tecnologia que simplifica e protege

Reduza risos e exposição acidental com sistema de retração por mola. Simples, seguro e em conformidade com a NR32.

Estéril, de uso único, com bisel trifacetado, o dispositivo é confeccionado em polímero plástico rígido, translúcido, compatível com seringas de conexões Luer Slip e Luer Lock, bem como seringas de preenchimento automático, garantindo um perfeito encaixe e vedação, proporcionando maior segurança e minimizando riscos de vazamentos.

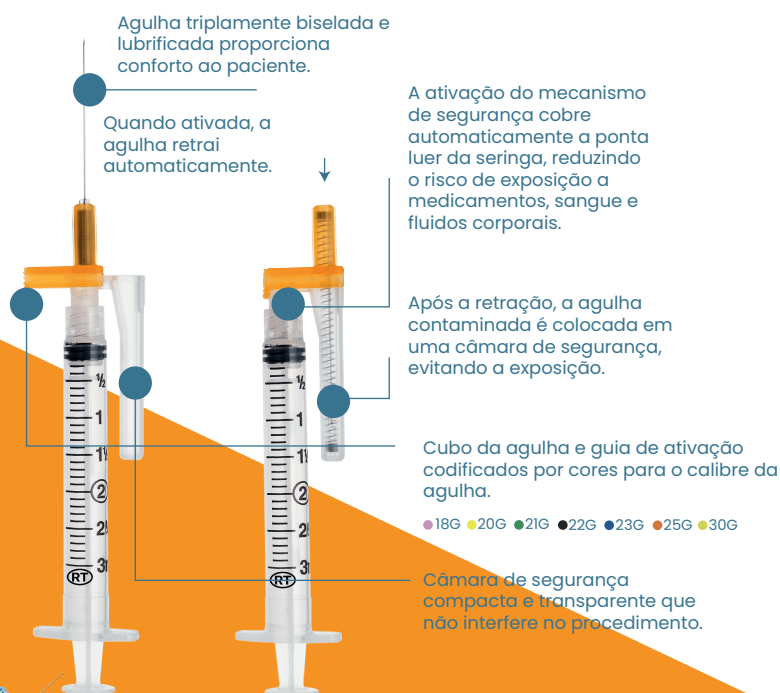

Vantagens

- **Maior redução** do risco de contaminação cruzada e transmissão de doenças;
- **Diminuição de custos** com tratamento de acidentes de trabalho, afastamentos e possíveis processos judiciais;
- **O acionamento da mola bloqueia a reutilização da agulha**, garantindo o cumprimento das exigências da NR32;
- A retração da agulha resulta na **diminuição de seu volume inicial**, reduzindo o descarte e promovendo economia para a instituição;
- **Fácil de usar** e requer treinamento mínimo.

Registro ANVISA: 10301169006

Tamanhos e Calibres

Caixa com 50 unidades
(embaladas unitariamente)

Para seringas de 1 e 3 ml

82211	30G x 1/2"	(13 mm x 0.30 mm)
-------	------------	-------------------

Para seringas de 1, 3, 5 e 10 ml

85091	18G x 1 1/2"	(40 mm x 1.20 mm)
85141	21G x 1 3/16"	(30 mm x 0.80 mm)
85041	21G x 1"	(25 mm x 0.80 mm)
85121	22G x 1 3/16"	(30 mm x 0.70 mm)
85021	22G x 1"	(25 mm x 0.70 mm)
85231	23G x 1"	(25 mm x 0.60 mm)
85251	24G x 3/4"	(20 mm x 0.55 mm)
85291	25G x 5/8"	(16 mm x 0.50 mm)
85211	25G x 1"	(25 mm x 0.50 mm)
85241	26G x 1/2"	(13 mm x 0.45 mm)

Fale conosco!

🌐 webmedsaude.com.br
✉ comercial1@webmedsaude.com.br
☎ (32) 3241 5979

Acesse o QR Code e veja a EasyPoint® em ação



Descritivo Técnico

O **mecanismo de segurança integrado** proporciona visualização ideal da escala da seringa, facilitando o preparo da dose com máxima precisão.


As **seringas de insulina VanishPoint®** estão disponíveis com **graduações de 50 UI e 100UI**, garantindo a administração precisa de pequenas doses.

A **retração automática pré-remoção** reduz **efetivamente o risco de acidentes com perfurocortantes**, protegendo os profissionais de saúde durante todo o procedimento.

Para garantir a administração subcutânea adequada de insulina e maximizar o conforto do paciente, **as seringas VanishPoint®** estão disponíveis com **agulhas de diversos calibres**.

Vantagens

- **Administração de dose precisa** - graduações claras para máxima acurácia
- **Desenvolvida para o conforto do paciente** - opções de calibre de agulha adequadas a diferentes necessidades
- **Fácil utilização** - design intuitivo que simplifica o procedimento
- **Segurança garantida** - mecanismo de proteção eficaz e confiável
- **Redução do risco ocupacional** - minimiza lesões por acidentes com agulhas
- **Uso único garantido** - não reutilizável após ativação do mecanismo
- **Segurança até o descarte final** - proteção mantida durante todo o processo
- **Otimização do volume de descarte** - design compacto para gestão eficiente de resíduos

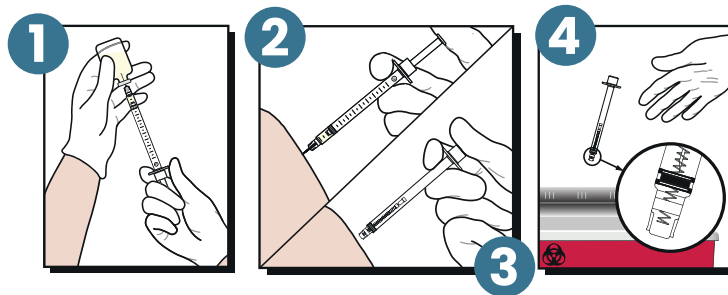

Informações de uso do produto

- 1 Prepare e administre a injeção utilizando técnica asséptica de acordo com o protocolo institucional.
- 2 Pressione o êmbolo para ativar a retração automática da agulha enquanto a agulha ainda estiver no paciente. A dose completa é administrada somente quando a retração da agulha é ativada.
- 3 A agulha retrairá automaticamente para dentro da seringa, prevenindo a exposição à agulha contaminada e tornando a seringa não reutilizável.
- 4 Descarte a seringa VanishPoint® em recipiente apropriado para perfurocortantes conforme protocolo da instituição.

Tamanhos e Calibres

Caixa com 100 unidades (embaladas unitariamente)

Insulina U-100, 50 unidades (0.5 ml)

15221	30G x 1/2" (12.7 mm x 0.30 mm)
15271	30G x 5/16" (8 mm x 0.30 mm)
15291	30G x 3/16" (5 mm x 0.30 mm)

Insulina U-100, 100 unidades (1 ml)

10211	29G x 1/2" (12.7 mm x 0.33 mm)
10231	27G x 1/2" (12.7 mm x 0.40 mm)
10251	30G x 3/8" (9.5 mm x 0.30 mm)
10271	30G x 5/16" (8 mm x 0.30 mm)

Fale conosco!

-  webmedsaude.com.br
 comercial@webmedsaude.com.br
 (32) 3241 5979

- Segura e eficaz em conformidade com a NR32
- Reduz significativamente o risco de lesões por agulha
- Proteção garantida ao profissional de saúde
- Registro ANVISA: 10301169008

